

Onderhoud en gebruik

Onderbeenprothesen zonder liner



Uw onderbeenprothese

De buitenkoker van uw prothese is door uw instrumentmaker voor u op maat gemaakt. In deze buitenkoker draagt u een zachte binnenkoker die de schokken opvangt en ervoor zorgt dat er zo min mogelijk drukpunten ontstaan. Over uw stomp draagt u een stompsok om de huid te beschermen en transpiratievocht op te nemen. Ook maken stompsokken het aantrekken van de prothese eenvoudiger.

Aantrekken

1. Trek de stompsok aan over uw stomp.
2. Daaroverheen schuift u de zachte binnenkoker.
3. Plaats over de binnenkoker het nylon kousje.
4. Vervolgens 'stapt' u in de buitenkoker.
5. Daarna trekt u het elastisch kniemanchet over uw prothese. De prothese is nu één geheel met uw been.

Uittrekken

1. Trek eerst het elastisch kniemanchet naar beneden.
2. Houd daarna het nylonkousje met één hand vast en druk met uw andere hand de harde buitenkoker naar beneden. Nu zit alleen de binnenkoker nog om uw been.
3. Trek het nylonkousje van de koker af.
4. Haal de koker van uw been en trek de stompsok uit.

Onderhoud

Goed onderhoud van uw prothesekoker, stompsokken en nylonkousjes is heel belangrijk. Hiermee voorkomt u nare geurtjes en infecties van de stomp door schimmels of bacteriën.

Onderhoud stompsokken en nylonkousjes

Gebruik elke dag schone stompsokken. Was uw stompkousen met de hand of in de wasmachine op maximaal 40 graden Celcius, met een neutraal wasmiddel, zonder wasverzachter. Het nylonkousje kunt u wassen als het vuil is. Op de verpakking van de stompsokken en nylonkousjes vindt u het wasvoorschrift.

Let op: stompsokken en nylonkousjes kunnen niet tegen wasverzachter, bleekmiddel, agressieve reinigingsmiddelen, deodorant en parfum.

Onderhoud prothesekoker

Het beste is om de binnenkoker elke dag schoon te maken met lauwwarm water en eventueel een ph-neutrale zeep of alcohol 70%. Spoel de koker grondig schoon, zodat alle zeepresten verdwenen zijn. Droog de koker goed af!



Meer informatie

Rijndam Orthopedietechniek
Westersingel 300, 3015 LJ Rotterdam
010 241 2555
orthopedietechniek@rijndam.nl
www.rijndamorthopedietechniek.nl

RJNDAM
ORTHOPEDIETECHNIEK

Rijndam Orthopedietechniek is onderdeel
van De Hoogstraat Orthopedietechniek